



PROCEDURA PŁUKANIA OCZU

1 Określ rodzaj substancji	2 Wybierz właściwą butelkę i rozpocznij płukanie	3 Kontynuuj przepłukiwanie z użyciem Plum Eye Wash	4 Płucz oczy zgodnie ze wskazówkami
Ciała obce (pył, kurz, opiłki metalowe, drzazgi itp.)	Plum Eyewash	Plum Eyewash	Płucz oczy tak długo, aż wypłuczesz ciała obce.
Kwasy	pH Neutral	Plum Eyewash	Płucz oczy płynem Plum pH Neutral przez ok. 2 minuty, aż opróżnisz butelkę. Kontynuuj płukanie stosując Plum Eye Wash, do momentu uzyskania pomocy lekarskiej.
Zasady	pH Neutral	Plum Eyewash	Płucz oczy płynem Plum pH Neutral przez ok. 2 minuty, aż opróżnisz butelkę. Kontynuuj płukanie stosując Plum Eye Wash, do momentu uzyskania pomocy lekarskiej.
Inne chemikalia (np. rozpuszczalniki i oleje)	Plum Eyewash	Plum Eyewash	Płucz oczy tak długo, aż dyskomfort nie będzie już odczuwalny. Kontynuuj płukanie stosując Plum Eye Wash, do momentu uzyskania pomocy lekarskiej.



pH Neutral



Plum Eyewash



Wyjmij butelkę ze stacji.



Odkęć nakrętkę zgodnie ze strzałką, zrywając zabezpieczenie.



Odchyl głowę do tyłu i lekko naciskając butelkę rozpocznij płukanie.



Oko można także przepłukać mając głowę przechyloną do przodu.

WAŻNE!

Wszelkie płyny, które mają kontakt z okiem, należy aplikować łagodnym i równomiernym strumieniem. Dlatego naciskaj butelkę delikatnie – nie wyciskaj płynu z użyciem siły. Niezależnie od rodzaju obrażeń oka, zawsze skontaktuj się z lekarzem. Zalecamy kontynuowanie płukania oczu do czasu przybycia lekarza.