

Instrukcja obsługi półprzyłbicy 01

1. Zastosowanie produktu

Półprzyłbica 01 to element uzupełniający odzieży ochronnej, zmniejszający ryzyko zakażeń drogą kropelkową. Chroni błony śluzowe ust i nosa, a także zabezpiecza przed drobnymi urazami mechanicznymi.

2. Sposób użycia

1. Zdejmij folię ochronną
2. Załóż na nos tak jak na poniższym zdjęciu
3. Pamiętaj półprzyłbica ma zakrywać nos i usta

3. Konserwacja

Ważne jest żeby półprzyłbica była zawsze czysta. Zdejmując oraz zakładając ją zawsze chwytaj za zauszuki. Zawsze należy dbać o czystość wewnętrznej strony półprzyłbicy ponieważ ma ona kontakt z wewnętrznymi drogami oddechowymi. Po zabrudzeniu wewnętrznej strony półprzyłbicy zdezynfekuj ją.

Półprzyłbica to produkt wielokrotnego użytku do konserwacji należy używać środków na bazie alkoholu (np. płynów do dezynfekcji powierzchni szklanych). W celu dokładnej dezynfekcji używaj środków na bazie alkoholu o minimalnej jego zawartości 70%.

Nie należy czyścić półprzyłbicy różnego rodzaju rozpuszczalnikami, benzyną itp. , oraz używać ściereczek z szorstką powierzchnią. Użycie tych środków może powodować odkształcenie frontu półprzyłbicy, oraz porysowanie powierzchni. Należy również unikać wyparzania w temperaturze powyżej 50°C.

Producent:
REDLIF Dorota Przywara
Miodowa 72,
43-300 Bielsko- Biała
NIP:9372484826



