
 Usage instruction

Do not wear with beards or other facial hair that may inhibit contact between the face and edge of the respirator

 Instrukcja obsługi

1. Przed otwarciem i dotknięciem maski dokładnie umyj ręce mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym o zawartości alkoholu większej niż 60%.
2. Otwórz maskę przy użyciu obydwóch rąk.
3. Dopasuj maskę do twarzy tak, aby zakrywała nos i usta. Gumki od maski nie mogą blokować się pomiędzy twarzą i maską.
4. Załóż gumki na uszy. Dopasuj maskę tak, aby przylegała wygodnie.
5. Dopasuj pasek nasadki na nos tak, aby przylegał całkowicie do nosa.
6. Dopasuj maskę do twarzy przy użyciu obydwóch rąk tak, aby całkowicie przylegała do twarzy.



## Środki ostrożności

1. Produkt nie nadaje się do ochrony przed szkodliwymi gazami, parą oraz oleistymi aerozolami.
2. Produkt nie wytwarza tlenu i nie nadaje się do stosowania w środowiskach o niskiej zawartości tlenu, pracach podwodnych, akcjach ratunkowych lub przy gaszeniu pożarów.
3. Nie zaleca się użytkowania maski jeśli nie czujesz, że krawędzie maski ściśle przylegają do twarzy.
4. Jeśli w trakcie użytkowania maski zauważysz, że jest uszkodzona lub opór oddechowy jest zbyt duży, wymień maskę na nową.
5. Maska jest produktem jedнокrotnego użytku. Zalecany czas użytkowania maski to 4-8 godzin.



InSpe - Savanoriu ave. 178F,  
Vilnius, Lithuania

CE notified  
body:

Polski Rejestr Statków S.A.  
al. gen. Józefa Hallera 126  
80-416 Gdańsk, Poland



EN149:2001+A1:2009