

PIERWSZA POMOC | PŁUKANKI DO OCZU | PLASTRY | MATERIAŁY OPATRUNKOWE



 **ACTIOMEDIC®**

 **MARKA GRAMM MEDICAL**

Marka ACTIOMEDIC® to połączenie sprawdzonych produktów z nowymi, innowacyjnymi rozwiązaniami, które odpowiadają na potrzeby rynku.. Ponad 100 lat doświadczenia jako producent urządzeń medycznych pozwala nam wprowadzać na rynek rozwiązania produktowe, które odpowiadają potrzebom klientów i użytkowników. Bliskie relacje z klientami i ożywiona wymiana pomysłów pomagają nam również oferować produkty pierwszej pomocy pierwszej pomocy, które przekonują inteligentnymi i przemyślanymi funkcjami.

ACTIOMEDIC® to silna marka produktów pierwszej pomocy, na które zawsze można polegać w 100% w nagłych wypadkach. Nasze produkty są przydatnymi towarzyszami zarówno w biznesie i pracy zawodowej, jak i w życiu prywatnym.


Wszechstronna gama produktów ACTIOMEDIC® charakteryzuje się zarówno niezmiennie wysoką jakością

Reaguj szybko, pomagaj w sposób ukierunkowany. Z ACTIOMEDIC®.





Płyn do przemywania oczu | Pierwsza pomoc dla oczu

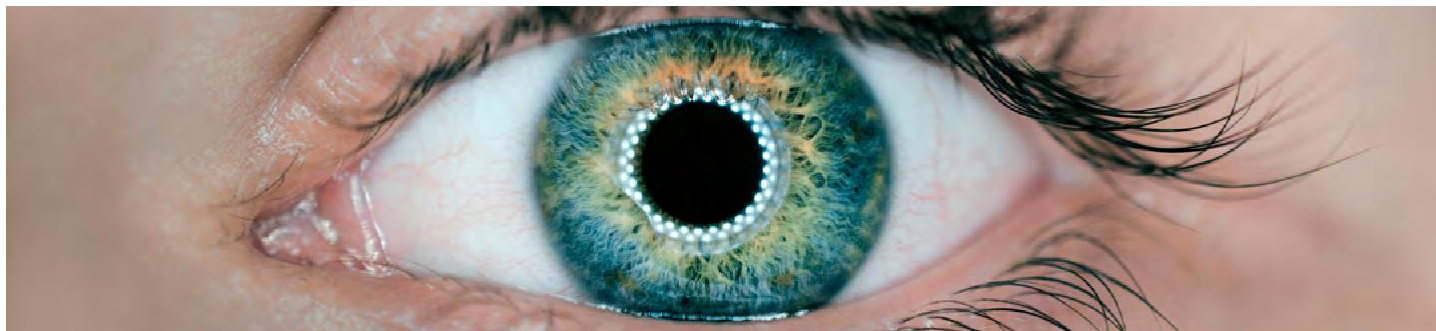

Liczy się każda sekunda: Ochrona najważniejszego zmysłu



Czy wiesz, że

Nasze oko jest arcydziełem natury i najważniejszym organem zmysłów człowieka. Tylko współdziałanie wielu małych części tego wrażliwego organu umożliwia widzenie.

Ponad 90% wszystkich wrażeń zmysłowych odbieranych jest przez oko. To wystarczający powód, aby zwrócić szczególną uwagę na ten narząd zmysłów – i przygotować się na najgorszy scenariusz.

Szybka pierwsza pomoc ma kluczowe znaczenie dla tego, czy wzrok zostanie upośledzony, czy w najgorszym przypadku utracony. W przypadku zanieczyszczenia ciałami obcymi lub substancjami chemicznymi konieczna jest szybka pierwsza pomoc. Jeśli w takim przypadku nie udzieli się natychmiastowej i konsekwentnej pierwszej pomocy, oko może doznać trwałego, nieodwracalnego uszkodzenia. Każdego roku urazy oczu są jednym z najczęstszych wypadków zgłaszanych przez stowarzyszenia zawodowe. **Ogromne znaczenie mają tutaj ostrożność i rozważne działanie.**

GRAMM medical oferuje różne rozwiązania, które mogą być stosowane w wersji mobilnej i stacjonarnej oraz są dostosowane do rodzaju pracy i wielkości przedsiębiorstwa. Różnorodność naszych produktów gwarantuje optymalne rozwiązanie, które jest odpowiednie dla każdego środowiska pracy.

Nasza koncepcja płukania oczu została opracowana w taki sposób, aby każdy użytkownik mógł z niej korzystać w łatwy i elastyczny sposób – bez pomocy innych osób. **Gwarantujemy bezpieczne i proste stosowanie.**

Wszystkie produkty **ACTIOMEDIC® EYE CARE** są produktami medycznymi przetestowanymi i zatwierdzonymi przez CE i podlegają ciągłej ścisłej kontroli jakości. Wszystkie produkty są zgodne z normą DIN EN 1515-4 (prysznic do oczu bez podłączenia do wody).

Masz pytania? Chętnie Ci doradzimy.

Zagrożone miejsca pracy

Wpływ zanieczyszczeń

Produkt do płukania oczu / działanie

Warsztaty Zakłady obróbki metali Przemysł
Przedsiębiorstwa obróbki drewna itp.
Stocznie i górnictwo
Ochrona ludności

Ciała obce, np. brud, kurz, pyny itp.

Roztwór chlorku sodu, 0,9%
→ wypłukuje ciała obce z oka

Laboratoria chemiczne
Firmy chemiczne Przemysł
Policja Wojsko
Straż pożarna i inne


Chemikalia, np. kwasy i zasady

Buforowany roztwór do płukania oczu BioPhos® 74
→ neutralizuje substancje chemiczne w oku i wypłukuje je



Nasza wysokiej jakości butelka do płukania oczu **ACTIOMEDIC® EYE CARE**


Nakładka przeciwpływowa

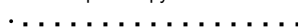

Ergonomicznie ukształtowana muszla oczna



Skład: NaCl 0,9% (sterylny)

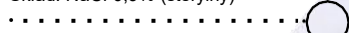

Opcjonalnie dostępne również w indywidualnych kartonach dla lepszej obsługi → strona 28



Opcjonalnie dostępny również z pojedynczą plombą → Więcej informacji na żądanie.

Wielojęzyczna etykieta



Piktogram zastosowania



Termin przydatności do spożycia 3 lata



Uchwyt ścienny z oczkiem do wszystkich butelek GRAMM do płukania oczu

Przepisy i normy dotyczące butelek do płukania

Butelki do płukania oczu **GRAMM medical** posiadają certyfikat CE i są zgodne z **normą DIN EN 15 154-4**. Płukanki do oczu bez podłączenia do wody są produktami medycznymi zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi i przepisami. **Ustawa o bezpieczeństwie i higienie pracy §3: Pracodawca musi zorganizować środki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnić odpowiednie środki poprawiające bezpieczeństwo i ochronę zdrowia w przedsiębiorstwie.**

Pracownicy muszą korzystać z zapewnionego sprzętu ochrony osobistej.

Rozporządzenie w sprawie miejsca pracy § 39:

W zależności od rodzaju zagrożenia (np. podczas pracy z kwasami i zasadami) należy zapewnić dostępność butelek do płukania oczu.

Transport towarów niebezpiecznych:

Obowiązek agencji spedycyjnej wyposażenia każdego przewoźnika towarów niebezpiecznych w apteczkę samochodową zgodną z normą DIN 13 164, która jest uzupełniona butelką do płukania oczu, okularami ochronnymi





Roztwór do płukania oczu BioPhos® 74

Płukanie oczu w przypadku przedostania się substancji chemicznych do oczu – jeszcze delikatniejsze dla oczu.

Zalecenie: Aby uzyskać więcej informacji, zeskanuj kod QR.



Nowa formuła:
bez składników
egzogenicznych

Szybka neutralizacja:
dzięki wysokiej zdolności
buforowej

Wielojęzyczna
etykieta: dostępna we
wszystkich językach
europejskich
językach

Szczególnie
delikatny: o neutralnym
pH i bez
konserwantów



Szczególne zalety



Czy wiesz, że

Twoje oko jest arcydziełem natury i najważniejszym organem zmysłów. Tylko współdziałanie wielu małych części tego organu umożliwia WIDZENIE.

Podczas pracy z chemikaliami mogą one dostać się do oka w postaci substancji stałych, ciekłych lub gazowych. **Dlatego ochrona oczu podczas pracy jest bardzo ważna!** Proszę mieć pod ręką **BioPhos® 74** na wypadek nagłej potrzeby, aby szybko i skutecznie zapobiec uszkodzeniu oczu w przypadku dostania się do nich substancji chemicznych.

BioPhos® 74 działa skutecznie i utrzymuje równowagę elektrolitową komórek dzięki zastosowaniu wyłącznie naturalnych substancji podlegających metabolizmowi fizjologicznemu i odpowiadają w szczególności pozakomórkowemu stosunkowi sodu do potasu.

Obszary zastosowania

Roztwór do płukania **BioPhos® 74** w butelkach o pojemności 250 ml lub 500 ml jest wszechstronny i stanowi ważny element apteczki pierwszej pomocy np. dla

- Przedsiębiorstwa i laboratoria
- Transport towarów niebezpiecznych
- Służby ratownicze
- Straż pożarna i ochrona przeciwkatastroficzna
- Policja i wojsko

BioPhos® 74 stanowi przydatny dodatek do stacjonarnych pryszniców oczu, ponieważ wysoko skoncentrowane, żrące i szybko wnikające substancje chemiczne wymagają szybkiej interwencji, a niebuforowane roztwory płuczące nie są wystarczające, aby zapewnić nieodwracalne zapobieganie uszkodzeniom komórek.

Działanie

Roztwór płuczący **BioPhos® 74** neutralizuje natychmiast dzięki swojemu działaniu buforującemu w fizjologicznym zakresie pH 7,4 i jest szczególnie delikatny dzięki braku jakichkolwiek składników egzogennych, takich jak konserwanty. Jest dostosowany do pozakomórkowej równowagi elektrolitowej tkanki. Dzięki wysokiej zdolności buforującej **BioPhos® 74** działa szybko po kontakcie oka z kwasami i zasadami. Sterylny roztwór do irygacji jest gotowy do użycia w poręcznej butelce o pojemności 250 ml lub 500 ml, co umożliwia szybkie podjęcie wstępnego leczenia. Zintegrowana ergonomiczna głowica irygacyjna umożliwia proste i prawidłowe stosowanie – nawet przez osoby nieposiadające wiedzy medycznej i osoby poszkodowane bez pomocy z zewnątrz. Po zastosowaniu **BioPhos® 74** oko należy przepłukać fizjologicznym roztworem chlorku sodu (0,9%).

Przydatne informacje na temat prawidłowego oznakowania roztworów do płukania oczu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych i normami dotyczącymi płukania oczu:

Etykieta wielojęzyczna dostępna we wszystkich językach europejskich.

Oznakowanie CE i oznaczenie centrum monitorowania

Oznaczenie sterylności produktu

Numer artykułu i PZN

Wskazanie producenta lub osoby wprowadzającej produkt do obrotu

Piktogramy ułatwiające I stosowanie płukania

Oznaczenie numeru partii i trwałości roztworu do płukania oczu (GRAMM medical: co najmniej 3 lata)

Zastosowanie – łatwe i szybkie

Nasze płyn do płukania oczu **ACTIOMEDIC® EYE CARE** z ergonomiczną głowicą do płukania są bardzo łatwe w użyciu:



1. Wyjmij butelkę ze stacji.



2. Zdejmij nasadkę ochronną z butelki płynu do płukania oczu



3. Obróć miszkę do płukania oczu o 180°, aż



4. Odchyl głowę do tyłu. przodu, umieść kubek przepłucz, jeśli kubek znajduje się nad okiem



5. Pochyl głowę do przodu i odzież nie powinna

Uwaga:

W przypadku wszelkich zabrudzeń oko należy przepłukać delikatnym i równomiernym strumieniem.

Podczas płukania delikatnie naciskaj butelkę do płukania oczu. **W przypadku urazu lub zabrudzenia oka należy zasięgnąć porady lekarza.**

Płukanie należy kontynuować podczas transportu do lekarza. Nie należy ponownie używać otwartej butelki (ryzyko infekcji).

Tutaj na życzenie logo Twojej firmy!




PLAN AWARYJNY

Wpływ zanieczyszczeń	Zalecany roztwór do płukania oczu	Instrukcja stosowania	Kontynuować do momentu uzyskania pomocy medycznej
Ciała obce takie jak brud, kurz, odłamki metalu lub drewna	Roztwór chlorku sodu (0,9%)	Płukać oczy, aż ciała obce zostaną wypłukane.	Płukać roztworem chlorku sodu (0,9%)
Kwas	Buforowany roztwór do płukania oczu BioPhos@74	Płukać oczy preparatem BioPhos@74 przez około 2,5 minuty, aż do opróżnienia butelki.	Płukać roztworem chlorku sodu (0,9%)
Alkalia	Buforowany roztwór do płukania oczu BioPhos@74	Przeplukać oczy preparatem BioPhos@74 przez około 2,5 minuty, aż do opróżnienia butelki.	Przepluć roztworem chlorku sodu (0,9%).
Inne np. spowodowane przez rozpuszczalnik, olej	Roztwór chlorku sodu (0,9%)	Płukać oczy, aż nieprzyjemne uczucie ustąpi.	Płukać roztworem chlorku sodu (0,9%)



Wyjmij butelkę ze stacji do płukania oczu lub z zestawu do płukania oczu.

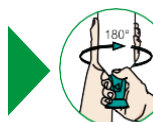

Obróć miseczkę do przemywania oczu o 180° w kierunku strzałki, aż uszczelnienie się



Odchyl głowę do tyłu i płucz dotknięte oko w sposób ciągły.



Przed odłożeniem butelki pochyl głowę do przodu, aby chronić ubranie przed zamoczeniem.



WAŻNE: Zawsze należy płukać oko konsekwentnie i ostrożnie. z lekarzem i przy tym trzymaj oko szeroko otwarte. Delikatnie ściskaj butelkę, płukania.

W przypadku uszkodzenia lub zanieczyszczenia oka należy skonsultować się natychmiast! Kontynuuj płukanie roztworem chlorku sodu (0,9%) do momentu uzyskania porady lekarza.

Butelki do płukania oczu



ACTIOMEDIC® EYE CARE butelka do płukania oczu z roztworem chlorku sodu 0,9%, 500 ml

Sterylna butelka do płukania oczu z roztworem chlorku sodu, zgodna z normą DIN EN 15 154-4, do płukania ciał obcych, np. kurzu, brudu, płynów. Do użytku mobilnego lub do uzupełniania stacji i walizki, z ergonomiczną głowicą płuczącą i nasadką przeciwpylową.

Zawartość: 500 ml Wymiary: 225 x ø80 mm Waga: Trwałość: > 3 lata
Czas płukania: ok. 5 min. 580 g

Nr art.	Wersja	PU
500.000.05000	Butelka do płukania oczu 500 ml z nasadką chroniącą przed kurzem	6 szt.
500.000.51000	Butelka do płukania oczu 500 ml z nasadką chroniącą przed kurzem w pojedynczym kartonie	12 szt.



ACTIOMEDIC® EYE CARE butelka do płukania oczu z roztworem chlorku sodu 0,9%, 250 ml

Sterylna butelka do płukania oczu z roztworem chlorku sodu, zgodna z normą DIN EN 15 154-4, do płukania ciał obcych, np. kurzu, brudu, płynów. Do użytku mobilnego lub do uzupełniania stacji i walizki, z ergonomiczną głowicą płuczącą i nasadką przeciwpylową.

Zawartość: 250 ml Wymiary: 190 x ø65 mm Waga: Trwałość: > 3 lata
Czas płukania: ok. 2,5 min. 330 g

Nr art.	Wersja	PU
500.000.02500	Butelka do płukania oczu 250 ml z nasadką chroniącą przed kurzem	10 szt.
500.300.02500	Butelka do płukania oczu 250 ml z nasadką chroniącą przed kurzem w pojedynczym kartonie	12 szt.



ACTIOMEDIC® EYE CARE butelka do płukania oczu z buforowanym roztworem płuczącym BioPhos® 74, 500 ml

Sterylna butelka do płukania oczu z roztworem płuczącym buforowanym fosforanem (4,9%), do neutralizacji i wypłukiwania substancji chemicznych z oczu, o wysokiej zdolności buforowej, szczególnie delikatna dzięki braku składników egzogennych i konserwantów, zgodna z normą DIN EN 15 154-4. Do użytku mobilnego lub do stacji uzupełniania i etui, z ergonomiczną głowicą płuczącą i nasadką przeciwpylową.

Zawartość: 500 ml Wymiary: 225 x ø80 mm Waga: Trwałość: > 3 lata PH
Czas płukania: ok. 5 min. 580 g neutralne

Nr art.	Wersja	PU
500.100.74500	BioPhos® 74 500 ml z nasadką chroniącą przed kurzem	6 szt.



ACTIOMEDIC® EYE CARE butelka do płukania oczu z buforowanym roztworem płuczącym BioPhos® 74, 250 ml

Sterylna butelka do płukania oczu z roztworem płuczącym buforowanym fosforanem (4,9%), do neutralizacji i wypłukiwania substancji chemicznych z oczu, o wysokiej zdolności buforowej, szczególnie delikatna dzięki braku składników egzogennych i konserwantów, zgodna z normą DIN EN 15 154-4. Do użytku mobilnego lub do uzupełniania zapasów na oddziale i w walizce, z ergonomiczną głowicą płuczącą i nasadką przeciwpylową.

Zawartość: 250 ml Wymiary: 190 x ø65 mm Waga: Trwałość: > 3 lata PH
Czas płukania: ok. 2,5 min. 330 g neutralne

Nr art.	Wersja	PU
500.100.74200	BioPhos® 74 250 ml z nasadką chroniącą przed kurzem	10 szt.
500.300.74200	BioPhos® 74 250 ml z nasadką chroniącą przed kurzem w pojedynczym kartonie	12 szt.



Nowa butelka do płukania oczu ACTIOMEDIC®

TWIN

Umożliwia jednoczesne płukanie obu oczu.

NOWOŚĆ
w asortymencie

Możliwość dostosowania

Ergonomicznie ukształtowana miseczka na oczy dla obu oczu.
Idealnie dopasowuje się do oczu i umożliwia wygodne płukanie.

Jednoczesne płukanie
Podwójny strumień irygacyjny do jednoczesnego i delikatnego płukania obu oczu.



Wgłębienie na nos

Szczególne zalety

W nagłych przypadkach **kilka sekund** może zadecydować o **pogorszeniu wzroku** lub, w najgorszym przypadku, utracie wzroku. Jeśli w takiej sytuacji nie udzieli się natychmiastowej i odpowiedniej pierwszej pomocy, oko może doznać trwałego, nieodwracalnego uszkodzenia.



Dlatego firma **GRAMM medical** oferuje **ACTIOMEDIC® EYE CARE** **TWIN** – płyn do płukania oczu, który można stosować do jednoczesnego płukania obu oczu w przypadku dostania się ciała obcego.

Dla podwójnego bezpieczeństwa i jeszcze szybszej pomocy w nagłych wypadkach.

Butelki do płukania oczu TWIN



ACTIOMEDIC® EYE CARE TWIN Butelka do płukania oczu z roztworem chlorku sodu 0,9%, 500 ml

Sterylna butelka do płukania oczu z roztworem chlorku sodu, do wypłukiwania ciał obcych, np. kurzu, brudu, płynów, zgodnie z normą DIN EN 15 154-4, do użytku mobilnego lub do uzupełniania na oddziale i w gabinecie, z ergonomiczną głowicą do jednoczesnego płukania obu oczu

Zawartość: 500 ml
Czas płukania: ok. 2,5 min.

Wymiary:
120 x 80 x 210 mm
Waga: 580 g

Trwałość:
> 3 lata

Nr art.	Wersja	PU
500.000.05002	Butelka do płukania oczu chlorek sodu 500 ml TWIN	6 szt.



ACTIOMEDIC® PIEŁĘGNACJA OCZU TWIN Butelka do płukania oczu z buforowanym roztworem płuczającym BioPhos® 74, 500 ml

Sterylna butelka do płukania oczu z buforowanym roztworem płuczającym BioPhos® 74, do neutralizacji i wypłukiwania substancji chemicznych z oczu, o wysokiej zdolności buforowej, zgodnie z normą DIN EN 15 154-4, do użytku mobilnego lub do uzupełniania na oddziale i w gabinecie, z ergonomiczną głowicą do jednoczesnego płukania obu oczu

Zawartość: 500 ml
Czas płukania: ok. 2,5 min.

Wymiary:
120 x 80 x 210 mm
Waga: 580 g

Trwałość:
> 3 lata PH
neutralne

Nr art.	Wersja	PU
500.200.74203	Butelka do płukania oczu BioPhos® 74 500 ml TWIN	6 szt.



ACTIOMEDIC® EYE CARE TWIN Pojedyncza stacja do płukania oczu I lub II

Stacja do płukania oczu z jedną butelką do montażu na ścianie, butelka gotowa do użycia i sterylna z ergonomiczną głowicą płuczającą TWIN do jednoczesnego płukania obu oczu, w tym tablica z piktogramami i lustro, ułatwiające obsługę, w tym uchwyt, plan postępowania w nagłych wypadkach dotyczących oczu i materiały montażowe, w zależności od zastosowania z 500 ml roztworu chlorku sodu lub 500 ml buforowanego roztworu płuczającego BioPhos® 74.

Czas płukania: ok. 2,5 min.

Wymiary: 215 x 80 x 300 mm
Trwałość: > 3 lata

Nr art.	Wersja	PU
500.200.30010	Stacja do płukania oczu chlorek sodu 500 ml TWIN Single I	1 szt.
500.200.30020	Stacja do płukania oczu BioPhos® 74 500 ml TWIN Single II	1 szt.



Nowa stacja do płukania oczu **ACTIOMEDIC® Medi2Protect**

Aby zapewnić jeszcze szybszą i skuteczniejszą pomoc w nagłych wypadkach.



Łatwy do uchwycenia
Duży uchwyt ułatwia użycie nawet w rękawiczkach w nagłych wypadkach.



Ochrona przed wodą



Zalecenie: zeskanuj kod QR, aby uzyskać więcej informacji.



Zintegrowane lustro

Podgrzewane
Opcjonalnie dostępna również wersja podgrzewana.

Okno
Dzięki temu można od razu rozpoznać, czy stacja do płukania oczu jest napełniona i gotowa do użycia.

Szczegółne zalety

W miejscach pracy narażonych na zagrożenia, takich jak warsztaty, sklepy z artykułami metalowymi lub laboratoria chemiczne, zgodnie z przepisami dotyczącymi miejsc pracy muszą być dostępne płyny do płukania oczu.

§39.

Firma GRAMM medical oferuje szybko dostępną, solidną i łatwą w obsłudze stację do płukania oczu, przeznaczoną do montażu na ścianie lub do użytku mobilnego. Wygodna stacja do płukania oczu montowana na ścianie zapewnia łatwy i szybki dostęp do płynu do płukania oczu, dzięki czemu w nagłych wypadkach można szybko zareagować.

Stacja oferuje miejsce na maksymalnie trzy butelki do płukania oczu **ACTIOMEDIC® EYE CARE**, które można łączyć w zależności od potrzeb.

Kolejną bardzo ważną zaletą naszej nowej stacji do płukania oczu jest jej elastyczność w użyciu. **Zamontowana na ścianie** stanowi konkretny punkt kontaktowy dla osób poszkodowanych, a dzięki jaskrawemu kolorowi sygnałowemu jest łatwa do znalezienia nawet przy ograniczonej widoczności. **Jako mobilna apteczka ratunkowa** może być również zabrana do strefy zagrożenia, dzięki czemu w nagłych wypadkach można szybko i elastycznie udzielić pierwszej pomocy bezpośrednio na miejscu wypadku.

Stacja do płukania oczu Medi2Protect



ACTIOMEDIC® EYE CARE Medi2Protect I

Szybko dostępna i łatwa w użyciu stacja do płukania oczu w kolorze pomarańczowym, do montażu na ścianie lub do użycia jako mobilna apteczka ratunkowa, z przezroczystym panelem przednim, trzema butelkami gotowymi do użycia i sterylnymi z ergonomiczną głowicą do płukania, w tym lusterkiem ułatwiającym obsługę, pyłoszczelna, wodoodporna i zajmująca mało miejsca, w tym materiały montażowe + plan postępowania w nagłych wypadkach dotyczących oczu

Czas płukania: ok. 15 min (łącznie)
Wymiary: 35,5 x 11 x 50 cm

Trwałość > 3 lata
Waga: 2,75 kg

Nr art.	Wersja	PU
500.200.20000	Stacja do płukania oczu 2 x 500 ml chlorku sodu 0,9% 1 x 500 ml BioPhos® 74	1 szt.



ACTIOMEDIC® EYE CARE Medi2Protect II

Łatwo dostępna i prosta w obsłudze stacja do płukania oczu w kolorze pomarańczowym, do montażu na ścianie lub do wykorzystania jako mobilna apteczka ratunkowa, z przezroczystym panelem przednim, trzema butelkami gotowymi do użycia i sterylnymi z ergonomiczną głowicą do płukania, w tym lusterkiem ułatwiającym obsługę, pyłoszczelna, wodoodporna i zajmująca mało miejsca, w tym materiały montażowe + plan postępowania w nagłych wypadkach dotyczących oczu

Czas płukania: ok. 15 min (łącznie)
Wymiary: 35,5 x 11 x 50 cm

Trwałość > 3 lata
Waga: 2,75 kg

Nr art.	Wersja	PU
500.200.20010	Stacja do płukania oczu 3 x 500 ml chlorek sodu 0,9%	1 szt.



500.200.10000



500.200.10010

ACTIOMEDIC® EYE CARE Medi2Protect Stacja do płukania oczu

TWIN I lub II

Łatwo dostępna i prosta w obsłudze stacja do płukania oczu w kolorze pomarańczowym, do montażu na ścianie lub do wykorzystania jako mobilna apteczka ratunkowa, z przezroczystym panelem przednim, trzema butelkami gotowymi do użycia i sterylnymi, z ergonomiczną głowicą płuczącą TWIN, w tym lusterkiem ułatwiającym obsługę, pyłoszczelna, wodoodporna i zajmująca mało miejsca, w tym materiały montażowe + plan postępowania w nagłych wypadkach dotyczących oczu, dostępna w dwóch wersjach

Medi2Protect TWIN I

Zawartość: 2 x 500 ml chlorku sodu 1 x
500 ml BioPhos® 74
Czas płukania: 2,5 minuty na butelkę

Wymiary: 350 x 110 x 500 mm
Waga: 2,75 kg Trwałość: > 3
lata

Medi2Protect TWIN II

Zawartość: 3 x 500 ml chlorku sodu Czas
płukania: 2,5 minuty na butelkę

Wymiary: 350 x 110 x 500 mm
Waga: 2,75 kg Trwałość: > 3
lata

Nr art.	Wersja	PU
500.200.10000	Stacja do płukania oczu TWIN I	1 szt.
500.200.10010	Stacja do płukania oczu TWIN II	1 szt.

Stacje do płukania oczu

ACTIONMEDIC® EYE CARE Design Stacja do płukania oczu Medidrop I

Atrakcyjna wizualnie i łatwa w użyciu stacja do płukania oczu z przezroczystą pokrywą i dwiema butelkami do montażu na ścianie, butelki gotowe do użycia i sterylne z ergonomiczną głowicą płuczącą, w tym lustro i piktogram ułatwiający obsługę, pyłoszczelna i zajmująca mało miejsca, w tym materiały montażowe + plan postępowania w nagłych wypadkach dotyczących oczu.

Zawartość: 2 x 500 ml roztworu chlorku sodu 0,9

Czas płukania (łącznie): ok. 10 min

Trwałość: > 3 lata

Wymiary: ok. 27 x 10 x 35 cm

Nr art.	Wersja	PU
500.101.10010	2 x 500 ml chlorku sodu 0,9%	1 szt.



ACTIONMEDIC® EYE CARE Design Stacja do płukania oczu Medidrop II

Estetyczna i łatwa w użyciu stacja do płukania oczu z przezroczystą pokrywą i dwiema butelkami do montażu na ścianie, butelki gotowe do użycia i sterylne z ergonomiczną głowicą płuczącą, w tym lustro i piktogram ułatwiający obsługę, pyłoszczelna i zajmująca mało miejsca, w tym materiały montażowe + plan postępowania w nagłych wypadkach dotyczących oczu.

Zawartość: 1 x 500 ml roztworu chlorku sodu i 1 x 250 ml buforowanego roztworu płuczającego BioPhos® 74

Czas płukania:

ok. 5 min. chlorek sodu, ok. 2,5 min.

BioPhos® 74

Wymiary: ok. 27 x 10 x 35 cm Trwałość: > 3 lata

Nr art.	Wersja	PU
500.100.10020	1 x 500 ml chlorku sodu 0,9% + 1 x 250 ml BioPhos® 74	1 szt.



ACTIONMEDIC® EYE CARE Stacja do płukania oczu Pojedyncza

Stacja do płukania oczu z jedną butelką do montażu na ścianie, butelka gotowa do użycia i sterylna, z ergonomiczną głowicą do płukania i nasadką przeciwpylową, w zestawie tablica z piktogramami i lustro, ułatwiające obsługę, w zestawie uchwyt, plan postępowania w nagłych wypadkach dotyczących oczu i materiały montażowe, dostępna w dwóch wersjach, w zależności od zastosowania, z 500 ml roztworu chlorku sodu lub 250 ml / 500 ml buforowanego roztworu do płukania Bio-Phos® 74.

Wymiary: ok. 20 x 30 cm

Trwałość: > 3 lata

Nr art.	Wersja	PU
500.000.01190	500 ml chlorku sodu 0,9%	1 szt.
500.100.01290	250 ml BioPhos® 74	1 szt.
500.100.01390	500 ml BioPhos® 74	1 szt.





ACTIONMEDIC® EYE CARE Stacja do płukania oczu Double I

Stacja do płukania oczu z dwoma butelkami do montażu na ścianie, butelki gotowe do użycia i sterylne, z ergonomiczną głowicą do płukania i nasadką przeciwpylową, w zestawie uchwyt do montażu na ścianie, z lustrem i piktogramem ułatwiającym obsługę, w zestawie materiały montażowe + plan postępowania w nagłych wypadkach dotyczących oczu. Zawartość: 2 x 500 ml roztworu chlorku sodu 0,9

Czas płukania: ok. 10 min (łącznie) Trwałość: > 3 lata Wymiary: ok. 25 x 30 cm

Nr art.	Wersja	PU
500.000.01100	2 x 500 ml roztworu chlorku sodu, 0,9	1 szt.



ACTIONMEDIC® EYE CARE Stacja do płukania oczu Double II

Stacja do płukania oczu z dwoma butelkami do montażu na ścianie, butelki gotowe do użycia i sterylne, z ergonomiczną głowicą do płukania i nasadką przeciwpylową, w tym uchwyt do montażu na ścianie, z lustrem i piktogramem ułatwiającym obsługę, wraz z materiałami montażowymi + planem postępowania w nagłych wypadkach dotyczących oczu. Zawartość: 1 x 500 ml roztworu chlorku sodu 0,9% i

1 x 250 ml buforowanego roztworu płuczącego BioPhos®74

Czas płukania: ok. 5 min chlorek sodu Wymiary: ok. 25 x 30 cm ok. 2,5 min BioPhos® 74 Trwałość: > 3 lata

Nr art.	Wersja	PU
500.100.01150	1 x 500 ml roztworu chlorku sodu, 0,9% + 1 x 250 ml BioPhos® 74	1 szt.



Torba na pasek na butelki do płukania oczu o pojemności 250 ml

Praktyczna torba na pasek z zapinaniem na rzep i paskami mocującymi do użytku mobilnego, chroni przed zabrudzeniem, można ją łatwo i szybko otworzyć w nagłych wypadkach.

Wymiary: ok. 20 cm x 7 cm Kolor: zielony, z symbolem płukania oczu

Nr art.	Wersja	PU
500.100.64300	Saszetka na butelkę 250 ml / pusta	1 szt.

 **GRAMM medical healthcare GmbH**
Werkstraße 13, 71384 Weinstadt, Niemcy

Telefon: +49 (0)7151 27 20 18 0
E-mail: info@gramm-medical.de
www.actionimedic.de

Twój specjalistyczny partner handlowy:

iCD